



WOLK

GEBRUIKSAANWIJZING

Inhoudsopgave



1. Belangrijke onderdelen	3
2. In gebruik nemen	5
3. Werking lampje	7
4. Batterij opladen	9
5. Alarmering	11
6. Wat te doen na een val?	13
7. Airbagpatroon vervangen	14
8. Wasvoorschrift	17
9. Aanvullende informatie	19
10. Service & Garantie	21


Gefeliciteerd met de aanschaf
van uw Wolk heupairbag!

De met zorg ontwikkelde Wolk heupairbag bevat geavanceerde technologie om uw heupen te beschermen. De heupairbag is gebruiksvriendelijk en u draagt Wolk onzichtbaar onder uw bovenkleding. De Wolk⁺ beschikt bovendien over een valalarm met GPS-functie.

Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voor een optimaal gebruik van uw Wolk. U vindt deze gebruiksaanwijzing ook op onze website: wolkairbag.com/contact.

Waarschuwing! Geen enkele airbag kan u in alle situaties en bij iedere val volledig beschermen of (ernstig) letsel voorkomen.

1. De belangrijkste onderdelen van de Wolk heupairbag.

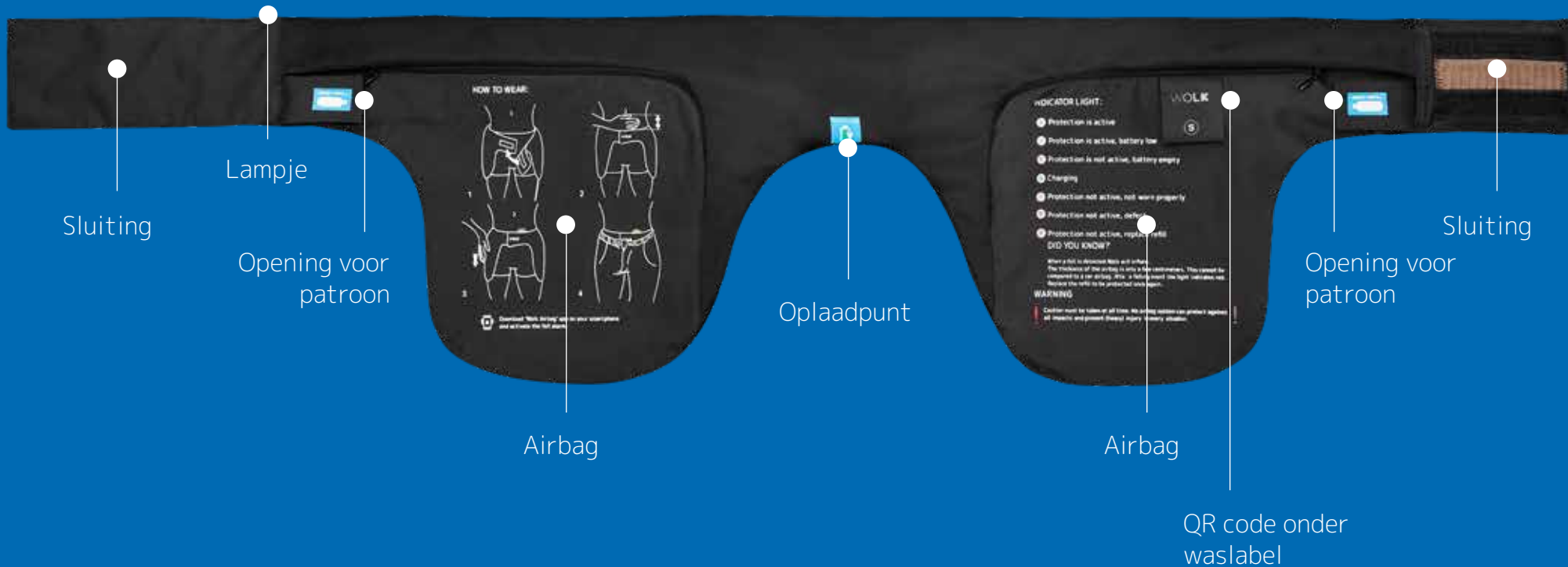


2. De Wolk heupairbag in gebruik nemen.

Wolk is klaar voor gebruik. De batterij is opgeladen.


1. Draag de Wolk heupairbag over of onder uw ondergoed en druk de klittenbandsluiting goed dicht.
2. Zorg dat de sluiting een handbreedte onder uw navel zit.
3. Zorg bij het aantrekken van uw broek of rok dat de airbags glad langs uw heupen vallen.
4. Controleer of het lampje naast de sluiting groen is.




1.

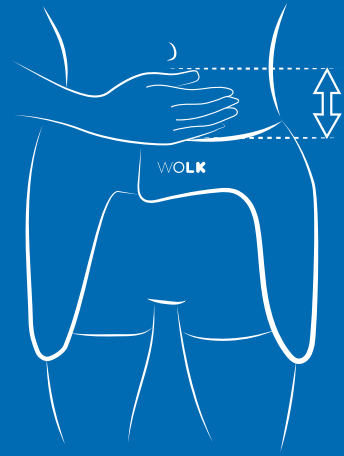

2.

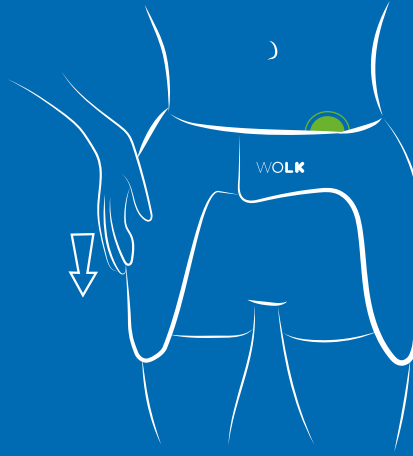

3.

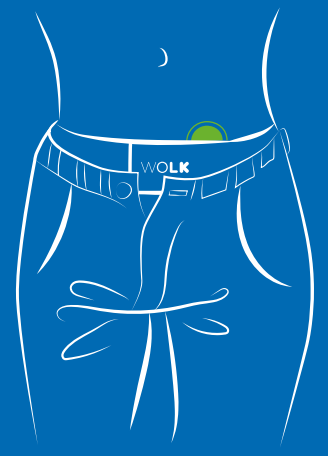

4.

3. Werking van het lampje.

A. De Wolk wordt **gedragen** en is **niet verbonden** met de oplader


● **Groen:** de batterij is opgeladen, de bescherming is actief.

De heupairbag is klaar voor gebruik.

☀️ **Oranje/groen knipperend:** de bescherming is actief, maar de batterij is bijna leeg. Laad tijdig de batterij op (zie pag 7).

☀️ **Rood/oranje knipperend:** de bescherming is niet actief, de batterij is leeg. Laad de batterij op (zie pag 7).

☀️ **Rood knipperend:** de bescherming is niet actief. Open en sluit het klittenband. Blijft het lampje rood/zwart, neem dan contact op met de Wolk klantenservice (085 060 55 56).

 **Oranje knipperend:** Wolk wordt verkeerd gedragen / was-stand.


● **Rood:** de bescherming is niet actief. Er heeft een activatie plaatsgevonden. Vervang de airbagpatroon (zie pag 13).

B. Wolk wordt **niet gedragen en is verbonden met de oplader**

● **Oranje:** de batterij is aan het opladen.

● **Groen:** de batterij is vol.

● **Rood continu:** Technische storing: neem contact op met Wolk (085 060 55 56).

 **Rood knipperend:** Technische storing: neem contact op met Wolk (085 060 55 56).

De Wolk


4. heupairbag opladen.

Een volledig opgeladen Wolk batterij gaat circa 2 dagen mee. Als het lampje rood/oranje knippert is de batterij leeg en bent u niet meer beschermd. Het opladen van de Wolk heupairbag kost circa 3,5 uur.

Ligt de heupairbag langer aan de oplader, dan kost dit geen extra stroom en is dit niet schadelijk voor de heupairbag.

De Wolk airbag opladen

1. Duw de meegeleverde oplader in het stopcontact.
2. Duw de kleine stekker van de oplader in het oplaadpunt. Het lampje brandt oranje.
3. Als het lampje groen brandt is de batterij voldoende opgeladen.

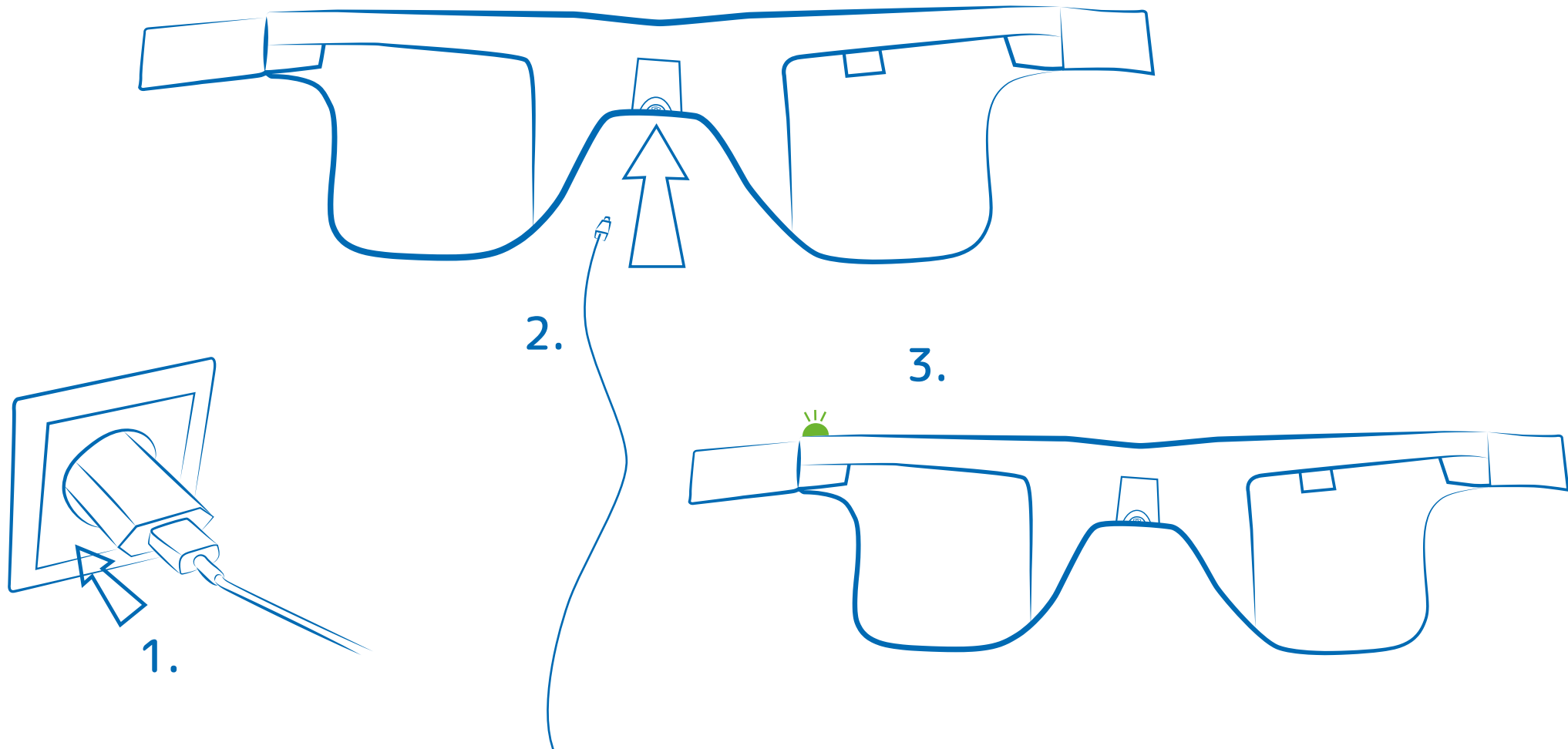

5. Wolk⁺ alarmering.

De Wolk⁺ heupairbag beschikt over een valalarm met GPS-functie.

Indien het alarm wordt geactiveerd ontvangt uw contactpersoon een alarmmelding voorzien van de locatie.

Het alarm kan op 2 manieren worden geactiveerd:


1. Alarmering bij een val.

Dit gebeurt automatisch.

2. Alarmering door de Wolk drager (zonder val):

door herhaaldelijk op de linker- of rechterkant van uw Wolk te slaan (de airbags worden niet opgeblazen). Het alarm is verzonden als het lampje meerkleurig knippert.

De Wolk⁺ alarmering kan ingesteld worden door de QR code op de Wolk te scannen met uw smartphone. U vindt de QR code onder het waslabel. Wilt u achteraf de meldingen aanpassen? Ga dan naar www.wolkairbag.com/alarm.

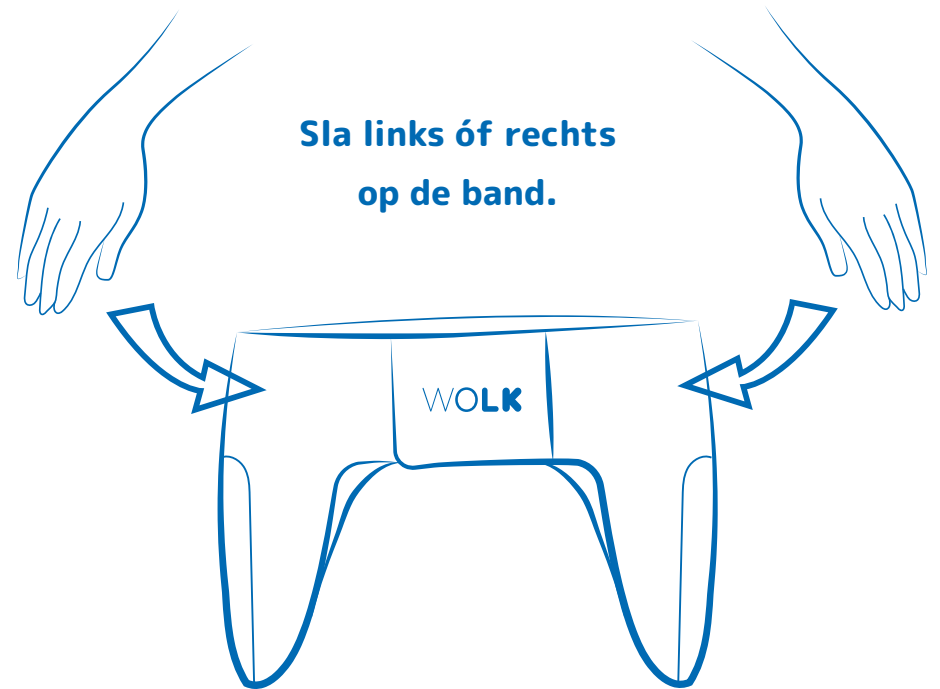

6. Wat te doen na een val?

Na een val en activatie van één van de airbags, brandt het lichtje rood. De airbagpatroon aan de kant van de val moet vervangen worden.

Bij aanschaf van de Wolk heupairbag ontvangt u standaard 1 extra airbagpatroon.

U kunt de airbagpatronen snel en eenvoudig bij bestellen via <https://www.wolkairbag.com/accessoires>.



Wij raden u aan altijd een of twee patronen op voorraad te hebben, zodat uw Wolk, na vervanging van de patroon, direct weer bruikbaar is.

Vervangen
7. airbag-
patroon.




Een airbagpatroon is eenvoudig te vervangen:

1. Open de patrooningang
2. Ontkoppel de patroon van het kabeltje. Verwijder de gebruikte patroon (mag in de afvalbak)
3. Plaats een nieuw patroon (de smalle kant eerst (3.))
4. Koppel de nieuwe patroon aan het kabeltje (4.)

NB: bij een gebruikt patroon is het slagpinnetje zichtbaar door het gaatje in de patroon.

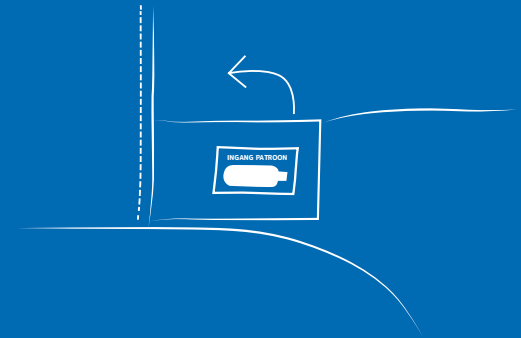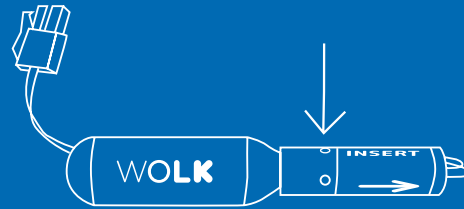

1.

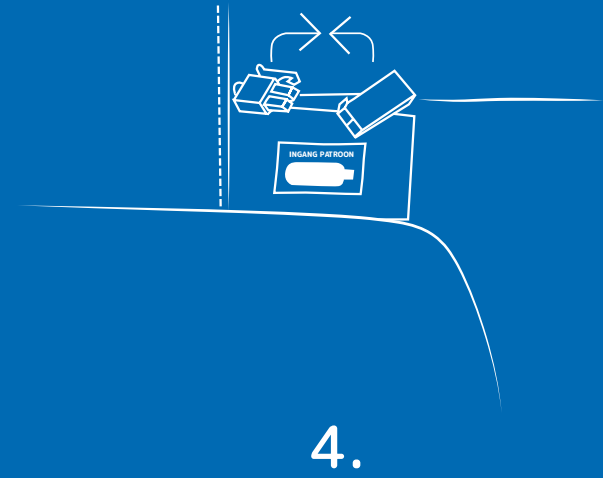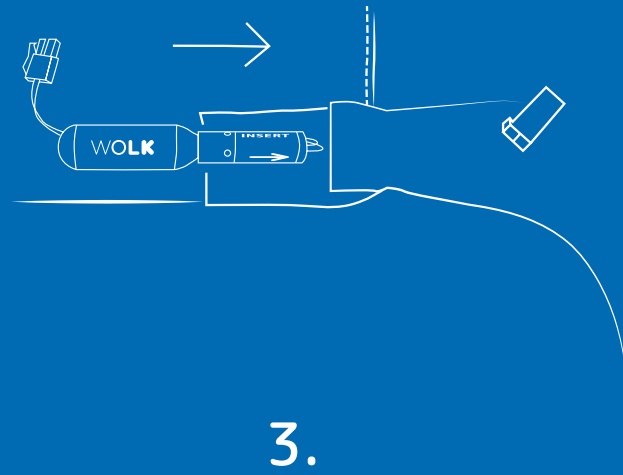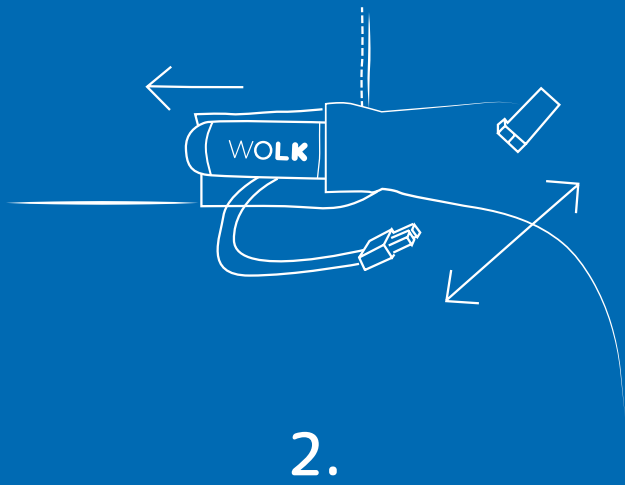

Was- 8. voor- schrift.

De Wolk kan in zijn geheel op 40 graden worden gewassen. Verwijder geen van de onderdelen!

1. Sluit het klittenband.
2. Het lampje knippert oranje.
3. Plaats de Wolk heupairbag in de wasmachine.
4. Was op max. 40^o C.


5. Centrifugeren op laag toerental (max 800).
6. Bij voorkeur niet in de droger.

Het wasvoorschrift bevindt zich ook op het label van de heupairbag.


1.




2.

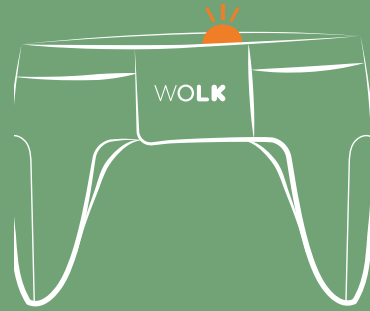


3.

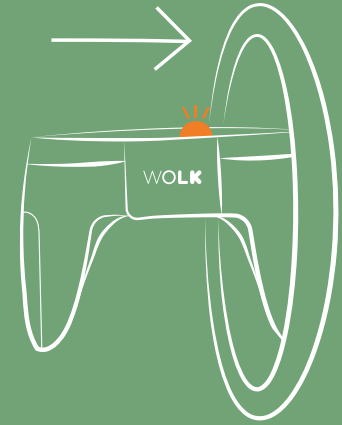


4.

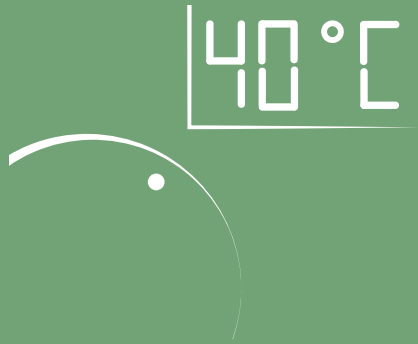

5.

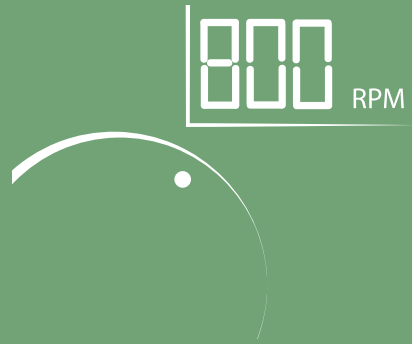

6.

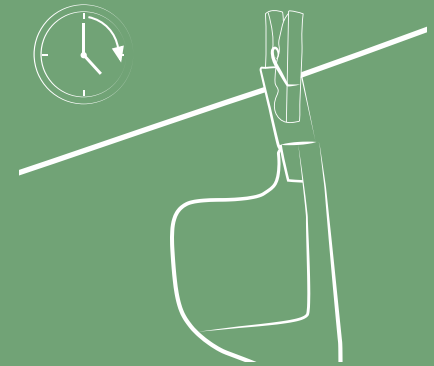

9. Aan- vullende informatie

Wolk en toiletbezoek: schuif de Wolk heupairbag omhoog. U hoeft de heupairbag niet af te doen.

Wolk tijdens het slapen: u kunt Wolk ook 's nachts dragen. Draag een nauwsluitend broekje over de heupairbag heen, zodat deze tijdens het slapen op de juiste plek blijft zitten.

Wolk bij een wandeling

buitenshuis: Wolk is geschikt voor wandelingen buitenshuis.

Wolk op de fiets: Wolk is geschikt voor op de stadsfiets of e-bike.

Wolk en sporten: draag de heupairbag niet tijdens het sporten, dit kan leiden tot onnodige activatie van de airbag.

10. Service & Garantie

U heeft een jaar garantie op de elektronica van de Wolk heupairbag. Op de stoffen hoes biedt Wolk een garantie van drie maanden.

Heeft u problemen met de Wolk heupairbag of is er een defect? Neemt u dan contact op met de Wolk Klantenservice:

Telefoon: 085 060 55 56

(ma t/m vr 9.00 – 18.00 u)

E-mail:

klantenservice@wolkairbag.com.

WOLK

WOLK HEUPAIRBAG | WOLKAIRBAG.COM